

The logo for Contour next ONE is centered on a dark blue gradient background. 'Contour' is in white, 'next' is in white with a blue 'x', and 'ONE' is in large teal letters with a double quote. Below it is the Arabic text 'نظام مراقبة جلوكوز الدم' in white.

ContourTM next ONE»

نظام مراقبة جلوكوز الدم

إنشاء برامج تذكير الاختبار
Test Reminder Plans
باستخدام تطبيق كونتور للسكري
CONTOUR™DIABETES app




استشيروا دائما أخصائي الرعاية الصحية لديكم قبل إجراء أي تغييرات في
العلاج، النظام الغذائي أو ممارسة التمارين



Contour
next ONE™
نظام الحقن لقيوس لدم

تساعدكم برامج تذكير الاختبار
Test Reminder Plans
على تحسين اختباراتكم
لتوفير نتائج تمحكم رؤية أكثر
وضوحًا على نسب جلوكوز الدم لديكم

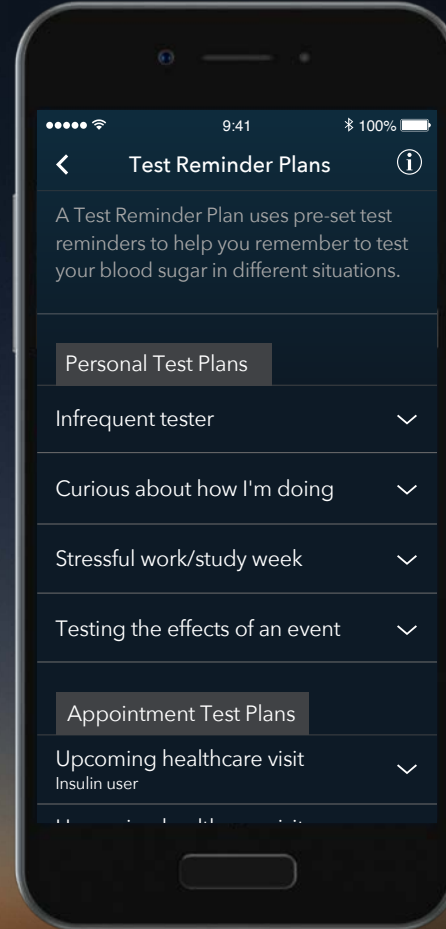


ContourTM
next ONE[®]
نظام القياس لقياس السكر في الدم

برامج تذكير الاختبار Test Reminder Plans

يمكنكم اختيار برنامج تذكير الاختبار
Test Reminder Plan
بالضغط علي My Reminders
(مذكراتي) في القائمة الرئيسية

1.

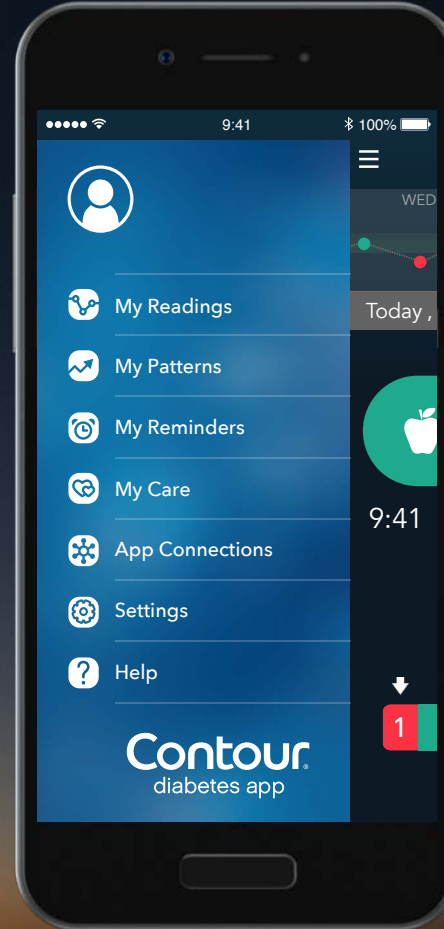

ContourTM
nextONETM
نظام القياس لقياس السكر في الدم

diabetes.ascensia.com


برامج تذكير الاختبار Test Reminder Plans

يمكنكم اختيار برنامج تذكير الاختبار
Test Reminder Plans

بالضغط على My Reminders
(تذكيراتي) في القائمة الرئيسية

ثم إضغطوا على الرمز + .

1.

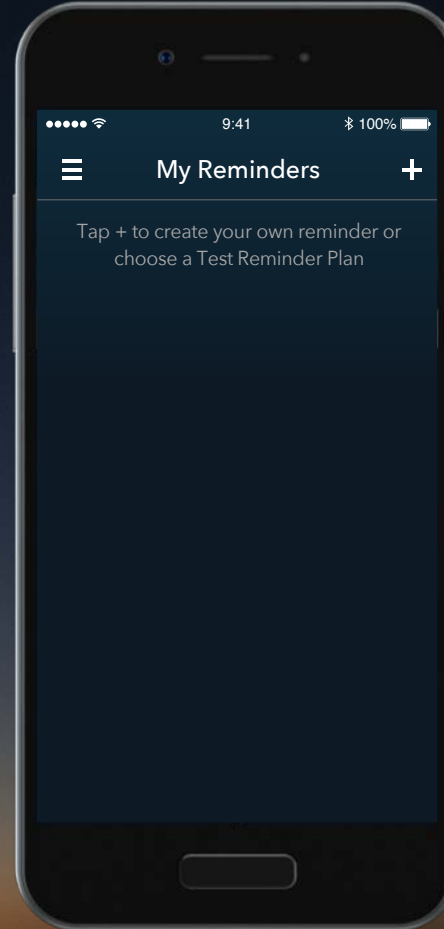


ContourTM
nextONE[®]
نظام القياس لقياس السكر في الدم

برامج تذكير الاختبار Test Reminder Plans

إضغطوا على
(برامج تذكير الاختبار) لإنشاء برنامج
تذكير اختبار Test Reminders

1.

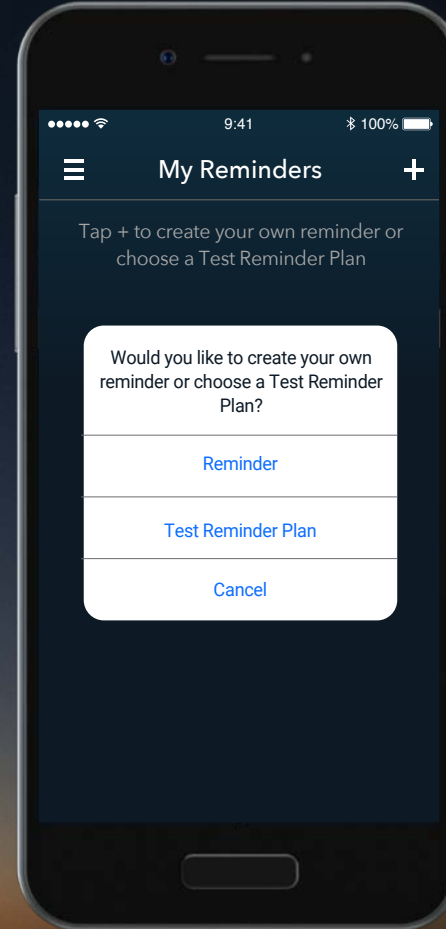


ContourTM
nextONE[®]
نظام القياس لقياس السكر في الدم

برامج تذكير الاختبار Test Reminder Plans

إختاروا برنامج تذكير الاختبار
Test Reminder Plan
الذي يناسبكم .

2.

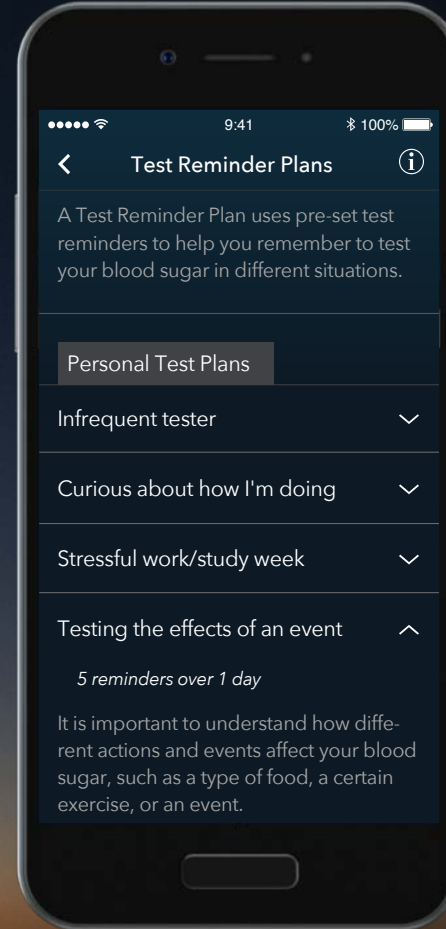


ContourTM
nextONE[®]
نظام اختبار لقيوس لدم

برامج تذكير الاختبار Test Reminder Plans

إختاروا برنامج تذكير الاختبار
Test Reminder Plan
الذي يناسبكم .

يسمح لكم الضغط على
السهم بجوار كل برنامج بمعرفة المزيد.

2.

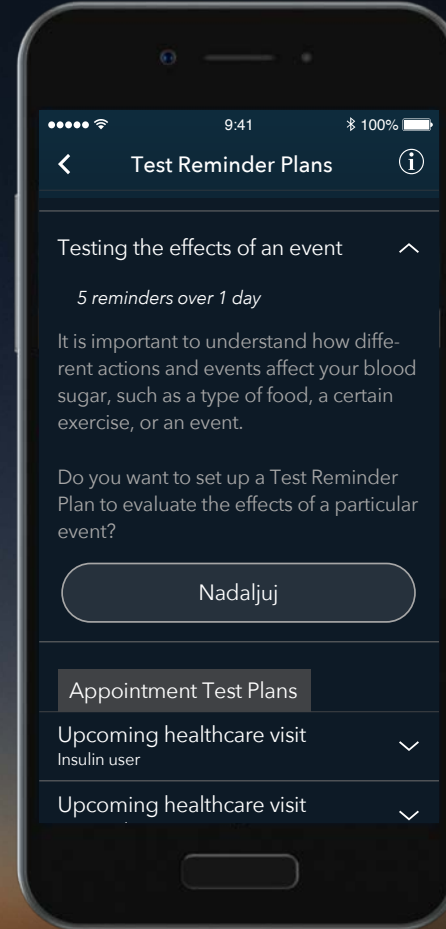

ContourTM
next ONETM
نظام اختبار الجلوكوز لدم

diabetes.ascensia.com


برامج تذكير الاختبار Test Reminder Plans

إختاروا برنامج تذكير الاختبار
Test Reminder Plan
الذي يناسبكم .

يسمح لكم الضغط على
السهم بجوار كل برنامج بمعرفة المزيد.

إضغطوا على Continue (متابعة)
لتشخيص برنامج تذكير الاختبار
Test Reminder Plans المختار

2.

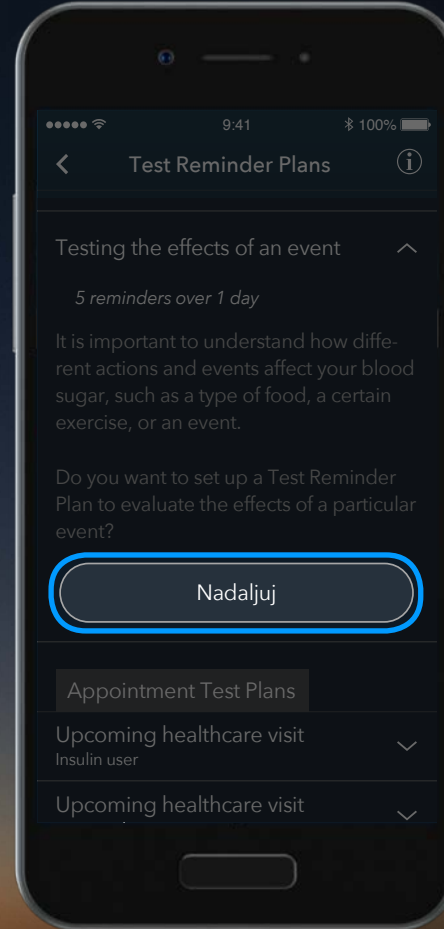


ContourTM
nextONETM
نظام اختبار الجلوكوز لدم

برامج تذكير الاختبار Test Reminder Plans

إضغطوا على خانة التاريخ والتوقيت لضبط تاريخ
وتوقيت الحدث الذي ترغبون متابعته.

3.

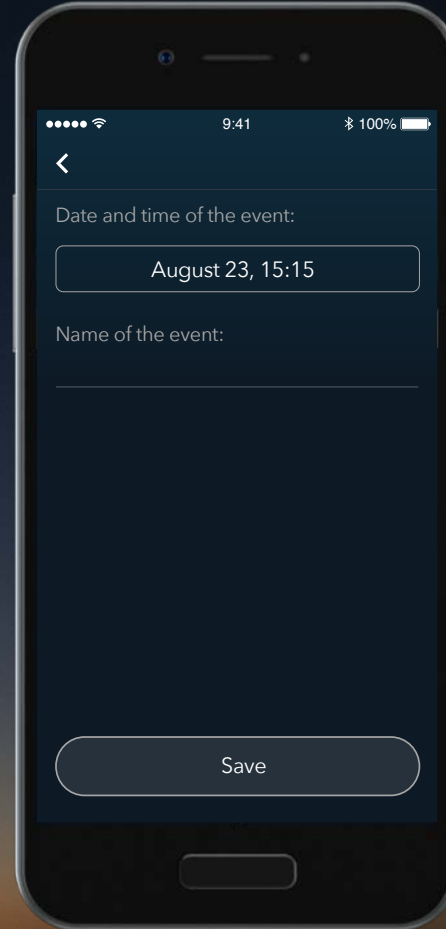

The image shows a smartphone screen with the Contour next ONE app interface. At the top, the status bar shows the time as 9:41 and battery at 100%. The app has a dark blue background. A back arrow is in the top left. The main content area has two sections: 'Date and time of the event:' with a button labeled 'August 23, 15:15', and 'Name of the event:' with a text input field. A 'Save' button is at the bottom.

ContourTM
next ONE[®]
نظام القياس الجليديوز لدم

diabetes.ascensia.com

برامج مذكرية الاختبار Test Reminder Plans

إضغطوا على خانة التاريخ والتوقيت لضبط تاريخ
وتوقيت الحدث الذي ترغبون متابعته.

3.

Testing the Effects of an Event

Date and time of the event:

August 23, 15:15

Name of the event:


Done

Sun 6 Sep	7	57
Mon 7 Sep	8	58
Tue 8 Sep	9	59
Wed 9 Sep	10	00
Thu 10 Sep	11	01
Fri 11 Sep	12	02
Sat 12 Sep	13	03

ContourTM
nextONETM
نظام اختبار الجلوكوز لدم

برامج مذكرى الاختبار
Test Reminder Plans
إضغطوا على خانة اسم الحدث
Event name لتسمية الحدث.

3.

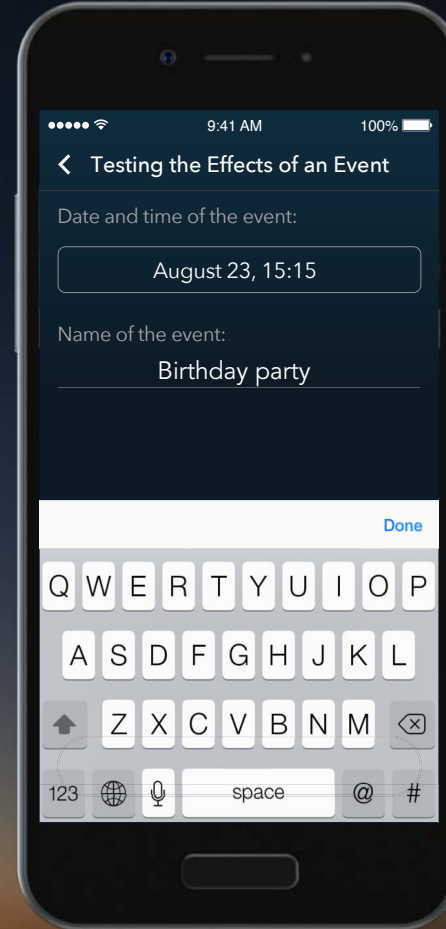


ContourTM
next ONETM
نظام اختبار الجلوكوز لدم

برامج مذكرات الاختبار Test Reminder Plans

إضغطوا على Save.

3.

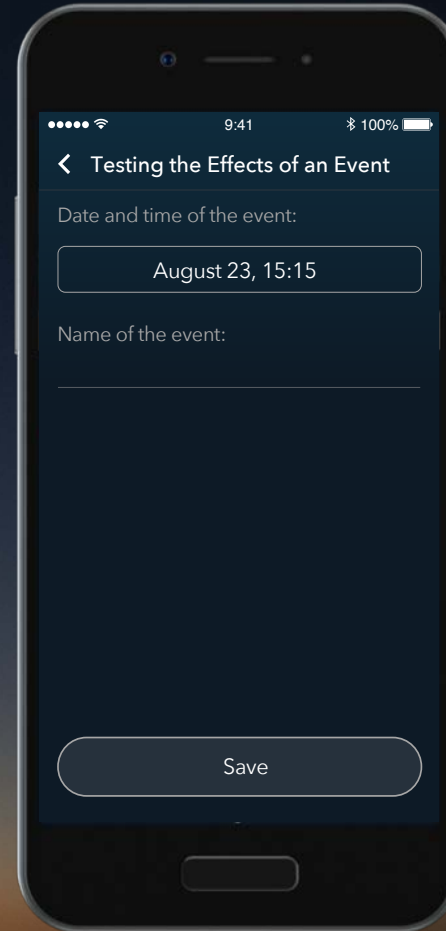

The image shows a smartphone screen with the Contour next ONE app interface. The screen displays a form titled "Testing the Effects of an Event". At the top, there is a back arrow and the title. Below the title, there is a section for "Date and time of the event:" with a text input field containing "August 23, 15:15". Below this, there is a section for "Name of the event:" with a text input field. At the bottom of the screen, there is a large "Save" button. The status bar at the top of the phone shows the time as 9:41 and battery level at 100%.


ContourTM
next ONE[»]
نظام اختبار الجلوكوز لدم

برامج تذكير الاختبار Test Reminder Plans

إضغطوا على **Save**.

تم تشغيل برنامج تذكير الاختبار
Test Reminder Plans الآن.

3.

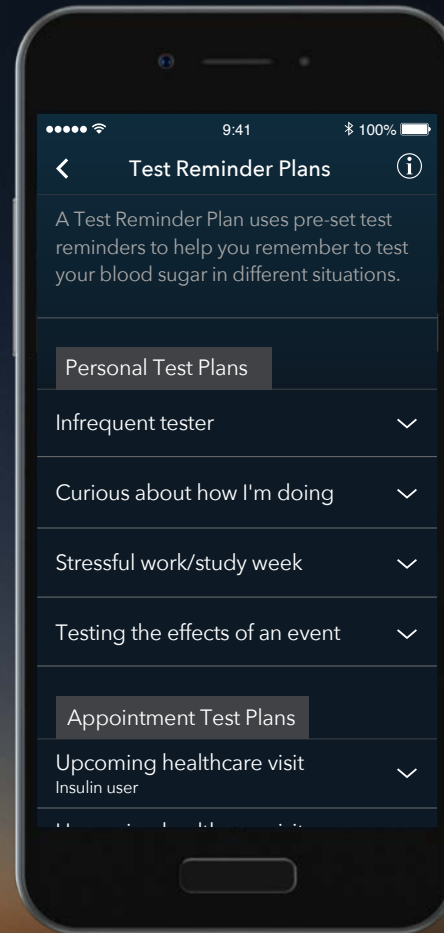

ContourTM
nextONE[®]
نظام اختبار الجلوكوز لدم

إتصلوا بأخصائي الرعاية الصحية لديكم وراجعوا
دليل المستخدم إذا كانت لديكم أسئلة حول
جهاز قياس الجلوكوز في الدم الذك كونتور بلص وان
CONTOUR®NEXT ONE أوتطبيق كونتور للسكري
CONTOUR™DIABETES app.

للمزيد من المعلومات ولمعرفة ما إذا كانت
هذه المنتجات متوفرة في بلدكم، قوموا
بزيارة الموقع diabetes.ascensia.com



بيانات مريض افتراضية لأغراض توضيحية فقط
ستشير دلائماً أصلياً الرعاية الصحية لديكم قبل إجراء أي مخبريات في العلاج، لنظام الغذائي أو ممارسة التمارين



إن Apple وشعار Apple علامات تجارية لشركة Apple Inc. مسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى.
إن App Store علامة خدمة لشركة Apple Inc. . إن Google Play علامة تجارية لشركة Google Inc
إن Ascensia Diabetes Care Holdings AG وشعار Ascensia Diabetes Care وCONTOUR علامات تجارية لشركة Ascensia Diabetes Care Holdings AG



Contour
next ONE™
نظام مراقبة جلوكوز الدم

diabetes.ascensia.com

The logo for Contour diabetes solutions is centered on a dark blue gradient background. The word "Contour" is in a large, white, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to its upper right. Below it, the words "diabetes solutions" are in a smaller, white, sans-serif font.

Contour[®]

diabetes solutions